

QUI ĐỊNH VỀ LẤY MẪU XÉT NGHIỆM HÓA SINH**1 – MẪU MÁU**

- Lấy mẫu khi bệnh nhân đã nhịn ăn từ 10-12 giờ.
- Ghi đúng họ tên, tuổi, số giường, tên khoa, phòng, chẩn đoán, BS chỉ định, người lấy mẫu vào ống và giấy xét nghiệm.
- Lấy tối thiểu 2ml máu vào ống, nếu ống có chất chống đông cần lắc nhẹ trộn đều (mẫu vỡ hồng cầu sẽ phải lấy lại máu).
- Chuyển về khoa Hóa Sinh ngay sau khi lấy không quá 30 phút.

TT	Tên xét nghiệm	Loại ống	Ghi chú
1	HbA1C, ACTH, PTH, BNP, Tacrolimus, Anti-TG, Cyclosporin, β Crosslap	Chống đông EDTA	Ống nút màu tím
2	D-Dimer	Chống đông Citrat	Ống nút màu xanh dương
3	Amoniac, Vitamin B12, Folate, TRAb, Prealbumin	Không dùng chất chống đông	Ống nút màu đỏ
4	Khí máu (lấy máu động mạch)	Ống đặc biệt	Phát tại khoa theo từng phiếu yêu cầu và hướng dẫn cụ thể
5	Các xét nghiệm còn lại	Chống đông Lithium Heparin	Ống nút màu xanh lá cây

2 - NƯỚC TIỂU: (5- 10ml)

- Ngẫu nhiên: Lấy nước tiểu buổi sáng, nước tiểu giữa dòng
- Nước tiểu 24 giờ: lấy toàn bộ nước tiểu trong 24 tiếng (theo qui định), trộn đều.

TT	Tên xét nghiệm	Loại ống	Ghi chú
1	M.A.U, Catecholamin, định lượng Protein	Ống thủy tinh	Liên hệ trực tiếp với khoa trước khi làm để lấy hóa chất bảo quản và hướng dẫn cụ thể.
2	Các xét nghiệm còn lại	Ống thủy tinh	

3 - DỊCH: (2- 3ml) vào ống thủy tinh

TRƯỞNG KHOA HÓA SINH

(đã ký)

PGS.TS. Phạm Thiện Ngọc